

ASEPTOPRINT® Spray

DÉSINFECTION DES EMPREINTES

Spray désinfectant prêt à l'emploi pour empreintes dentaires en alginate, silicone ou polyéther.

- ▶ Efficace contre 101 micro-organismes
- ▶ Temps d'exposition réduit
- ▶ Large gamme d'efficacité
- ▶ Excellente compatibilité avec les matériaux
- ▶ Biodégradable
- ▶ Conforme aux normes européennes

ASEPTOPRINT® Spray est une préparation prête à l'emploi pour la désinfection rapide d'empreintes dentaires et de porte-empreintes. Grâce à sa formulation sans aldéhyde, il n'occasionne aucune altération de la couleur des porte-empreintes ou de fixation de sang ou de protéines sur les matériaux d'empreinte. ASEPTOPRINT® Spray n'affecte pas la stabilité dimensionnelle des empreintes et des modèles en plâtre. ASEPTOPRINT® Spray peut s'utiliser pour la désinfection de tous types de matériels comme l'alginate, le polyéther, la polysulfure, le silicone A et le silicone C.

Portée d'application

- ▶ Pour la désinfection des empreintes dentaires
- ▶ Approprié pour l'alginate, le polyéther, polysulfide, silicone A et silicone K, ainsi que les porte-empreintes, cires d'enregistrement, appareils orthodontiques, ouvrages de prothésiste dentaire et matériel prothétique

Utilisation

Mouiller complètement les empreintes et les porte-empreintes pour une désinfection et laisser agir. Respecter la durée d'action indiquée sans la dépasser. Après la désinfection, rincer soigneusement les impressions à l'eau. N'utiliser que pour les matériaux tolérant l'alcool. Pour les matériaux délicats, tester la compatibilité avant l'usage en appliquant le produit sur une petite surface discrète.

Composition pour 100 g : 20 g d'éthanol, 28 g de 1-propanol, 0.056 g de composés d'ammonium quaternaire



Spectre d'efficacité / délais d'exposition

Bactéricide	60 secondes
Bactéries résistantes aux antibiotiques	60 secondes
Tuberculocide	60 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Levuricide	60 secondes
Levures résistantes aux antibiotiques	60 secondes
Fongicide	60 secondes
Virus enveloppés	15 secondes
BVDV	15 secondes
Coronavirus	15 secondes
Virus de l'hépatite B	15 secondes
Virus de l'hépatite C	15 secondes
Virus de l'herpès simplex	15 secondes
VIH	15 secondes
Virus de la grippe A	15 secondes
Virus de la pseudo-rage	30 secondes
Virus de la vaccine	15 secondes
Virus non-enveloppés	60 secondes
Adénovirus	60 secondes
Poliovirus	60 secondes
Polyomavirus	60 secondes
Rotavirus	15 secondes
Norovirus	30 secondes

Conforme aux méthodes standards DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, directives RKI / DVV, CE 1250.

Conditionnement : spray de 1 litre



SAS Dentea
 Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
 Mail : contact@societe-dentea.fr
 www.societe-dentea.fr