

DENTIRO® Foam

DÉSINFECTION DES SURFACES SANS ALCOOL

Mousse désinfectante sans alcool pour matériaux fragiles tels que le verre acrylique et les revêtements en cuir.

- ▶ Efficace contre 101 micro-organismes
- ▶ Short exposure time
- ▶ Compatible avec plus de 250 matériaux, y inclus les cuirs artificiels
- ▶ Testé sous conditions difficiles
- ▶ Testé selon 16 normes européennes

DENTIRO® Foam est une mousse sans alcool et prête à l'emploi pour la désinfection, le nettoyage et le soin de dispositifs médicaux non invasifs à la surface sensible comme les brancards et les fauteuils dentaires. Particulièrement adaptée pour la désinfection des matériaux sensibles à l'alcool comme le cuir naturel et artificiel, le plexiglas et le PVC.

Portée d'application

- ▶ Pour la désinfection, le nettoyage et le soin de dispositifs médicaux aux surfaces délicates
- ▶ Particulièrement adapté aux pièces en plastique sensibles à l'alcool, fauteuils de traitement et aux lits d'examen, ainsi qu'aux dispositifs médicaux comportant des matières délicates tels que le PVC

Utilisation

Verser DENTIRO® Foam dans la bouteille de mousse. Couvrir de mousse l'endroit à désinfecter, disperser de manière homogène la mousse à l'aide d'un chiffon sec et laisser agir. Respecter le temps d'exposition. Essuyer la surface avec un chiffon sec à usage unique.

Composition pour 100 g : 0.4 g de chlorure de benzalkonium, 0.4 g d'aminokylglycine



Spectre d'efficacité / délais d'exposition

Bactéricide	15 secondes
Bactéries résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Tuberculocide	60 minutes
Mycobactéricide	60 minutes
Levuricide	15 secondes
Levures résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Virus enveloppés	15 secondes
BVDV	15 secondes
Coronavirus	15 secondes
Virus de l'hépatite B	15 secondes
Virus de l'hépatite C	15 secondes
Virus de l'herpès simplex	15 secondes
VIH	15 secondes
Virus de la grippe A	15 secondes
Virus de la vaccine	15 secondes
Virus non-enveloppés	60 minutes
Adénovirus	30 minutes
Norovirus	60 minutes
Poliovirus	60 minutes
Rotavirus	30 secondes

Conforme aux méthodes standards DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615, directives RKI / DVV, CE 1250.

Conditionnement : 200 ml



SAS Dentea
 Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
 Mail : contact@societe-dentea.fr
www.societe-dentea.fr