

DENTIRO® Wipes

DÉSINFECTION DES SURFACES



Lingettes désinfectantes extrêmement imbibées avec une texture unique. Entièrement virucide en 60 secondes.



- ▶ Efficace contre 101 micro-organismes
- ▶ Agit en 60 secondes
- ▶ Compatible avec plus de 275 matériaux, y inclus les cuirs artificiels
- ▶ Séchage sans résidus
- ▶ Testé selon 18 normes européennes

DENTIRO® Wipes Extra Comfort sont des lingettes désinfectantes très imbibées avec une texture unique pour une désinfection sans résidu, un nettoyage et une désodorisation des petites surfaces des dispositifs médicaux non invasifs comme les tables d'opérations, les brancards, les tiges à perfusion et les fauteuils dentaires. La texture spéciale garde l'humidité des lingettes plus longtemps et facilite l'élimination des contaminants. DENTIRO® Wipes Extra Comfort sont bactéricides, tuberculocides, mycobactéricides, levuricides, fongicides et entièrement virucides en 60 secondes. Les lingettes ont été testées dermatologiquement et ont une faible teneur en alcool de moins de 50%. DENTIRO® Wipes Extra Comfort sont sans aldéhyde et biodégradables.

Portée d'application



- ▶ Pour une désinfection rapide et le nettoyage de petites surfaces de dispositifs médicaux, tables d'opération, tuyaux d'aspiration, pièces à main, contre-angles, griffes de lampe et d'équipement médical en matériaux comme l'aluminium, le cuivre, le caoutchouc et le plastique tel que le PVC et le verre d'acrylique

Utilisation



Mouiller complètement les surfaces et les objets à désinfecter et laisser agir. Respecter le temps d'action. Si nécessaire, essuyer la surface ou l'objet avec un chiffon doux à usage unique. N'appliquer que sur les matériaux tolérant l'alcool. Pour les matériaux délicats, tester la compatibilité avant l'usage en appliquant le produit sur une petite surface discrète.

Composition pour 100 g : 31.3 g d'éthanol, 16.7 g d'isopropanol

Spectre d'efficacité / délais d'exposition



Bactéricide	15 secondes
Bactéries résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Tuberculocide	60 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Levuricide	15 secondes
Levures résistantes aux antibiotiques	15 secondes
Fongicide	60 secondes
Virus enveloppés	15 secondes
BVDV	15 secondes
Coronavirus	15 secondes
Virus de l'hépatite B	15 secondes
Virus de l'hépatite C	15 secondes
Virus de l'herpès simplex	15 secondes
VIH	15 secondes
Virus de la grippe A	15 secondes
Virus de la vaccine	15 secondes
Virus non-enveloppés	60 secondes
Adénovirus	60 secondes
Entérovirus bovin	60 secondes
Norovirus	60 secondes
Poliovirus	60 secondes
Rotavirus	30 secondes

Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14615, EN 14675, EN 16651, directives RKI / DVV, CE 1250. Testé dermatologiquement.

Conditionnement : 165 lingettes / recharges



SAS Dentea
 Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
 Mail : contact@societe-dentea.fr
www.societe-dentea.fr