

iBOND®

Information Produit



iBOND® Universal

Adhésion. Facilité. Polyvalence.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

iBOND® Universal

Un point c'est tout.

Que pouvez-vous attendre d'un adhésif universel?

- Une puissance de collage forte et fiable.
- Une manipulation simple et sûre.
- Une technique de collage au choix.
- Utilisable avec tous matériaux et dans toutes indications.
- Un temps de polymérisation court.
- Pas besoin d'activateur de la polymérisation duale.
- Peu sensible à la technique.

**C'est ainsi que nous définissons un adhésif universel.
C'est ce que vous obtenez avec iBOND Universal.**

Facile d'emploi

iBOND Universal constitue un adhésif universel polyvalent et facile d'emploi. Sur le plan pratique, nous proposons des applicateurs en deux tailles, pour plus de flexibilité et d'efficacité et une adaptation adéquate à la dimension de chaque cavité. iBOND Universal se conserve à température ambiante.

Facilité d'emploi, valeurs d'adhérence élevées et pérennité du collage : iBOND Universal possède tous les atouts pour séduire les praticiens les plus exigeants.



Système "drop-control"

Une exclusivité de Kulzer : Grâce au débit contrôlé, vous versez exactement la quantité d'adhésif dont vous avez besoin. Le bec rainuré assure une parfaite séparation de chaque goutte et évite l'écoulement incontrôlé d'autres gouttes. Le nombre de gouttes contenu dans un flacon de 4 ml peut aller jusqu'à 220.



iBOND Universal et iBOND Ceramic Primer sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Indications : dentisterie adhésive. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Fabricant: Kulzer GmbH. CE 0197.

iBOND® Universal

Adoptez notre nouvelle formule – obtenez un collage efficace.

Collage instantané efficace

iBOND Universal contient du MDP dans sa formule et engendre une puissance de collage instantanée et fiable. Des scientifiques européens et japonais ont travaillé ensemble pour mettre au point un agent de liaison qui cumule le meilleur des deux mondes. Les différents composants interagissent pour permettre :


- Un mordantage efficace.
- Une bonne pénétration dans les tubules dentinaires.
- Une puissance de collage forte et durable.
- Un collage optimal aux céramiques, aux métaux et aux tissus dentaires.

Système de contrôle d'humidité

L'acétone agit en tant que repousseur d'eau et aide à l'évaporation rapide de l'eau. Lors du séchage à l'air comprimé, la phase aqueuse est séparée de la phase monomérique et l'efficacité du collage s'en trouve ainsi renforcée. Une quantité d'eau minimale dans la couche hybride est un facteur clé d'une couche hybride consistante.

L'avantage pour vous obtenu grâce à ce système de contrôle est un séchage facilité, une technique moins sensible, et une couche homogène de l'adhésif. La nouvelle formule procure une adhésion stable dans le temps, condition sine qua non pour des restaurations pérennes.

Système de contrôle de mouillage : l'acétone aide à l'élimination de l'eau.

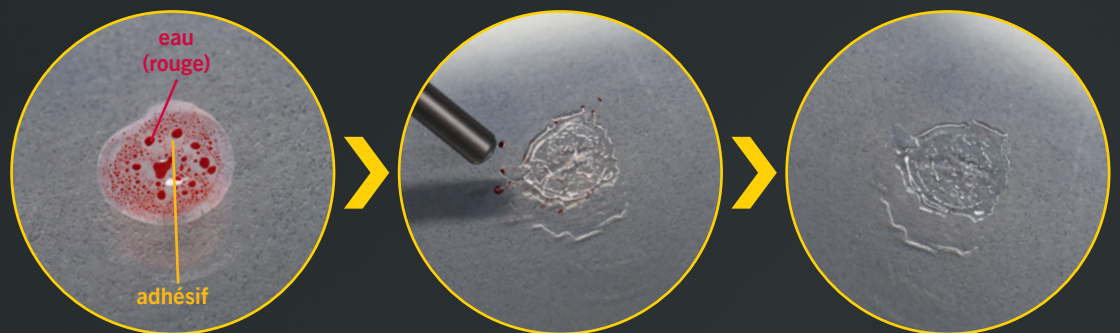

iBOND Universal et iBOND Ceramic Primer sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Indications : dentisterie adhésive. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Fabricant: Kulzer GmbH. CE 0197.

iBOND® Universal

Le collage commode.

Utilisation multitechnique

Avec iBOND Universal, vous obtenez une réelle puissance de collage dans chaque situation, quelle que soit votre technique de prédilection :


- Total-etch (mordançage total) – Avec une étape de mordançage de l'émail et de la dentine. (1)
- Mordançage sélectif – Avec une étape de mordançage de l'émail. (2)
- Automordançage – Pas d'étape de mordançage séparée requise. (3)



Avec iBOND Universal, vous obtenez une réelle puissance de collage dans chaque situation, quelle que soit votre technique de prédilection :

Des tests prouvent l'efficacité d'iBOND Universal ...avec la technique de mise en oeuvre de votre choix :


iBOND Universal obtient d'excellentes valeurs d'adhérence – dans chaque technique, même après simulation de vieillissement, ce qui confirme sa faible sensibilité à la technique

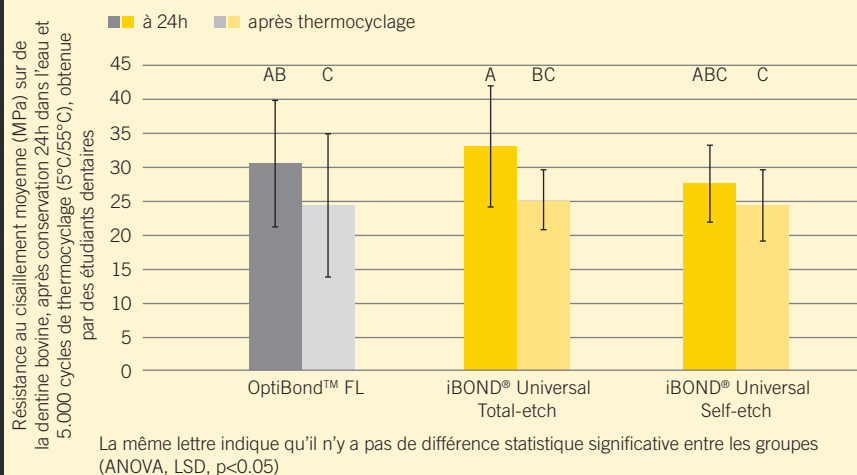

Source : Université de Mayence et R&D Kulzer, Allemagne, 2014

...sur différentes surfaces :

iBOND Universal présente des valeurs d'adhérence élevées au métal et à la céramique

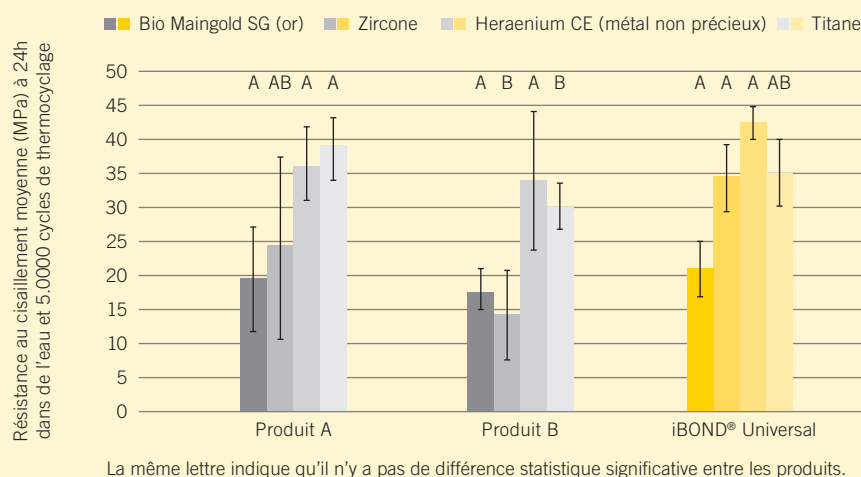

Source : R&D Kulzer, Allemagne, 2014


iBOND® Universal

Polyvalent en dentisterie adhésive.

Tous les matériaux dentaires

iBOND Universal est compatible avec les matériaux photopolymérisables, duals et autopolymérisables sans le recours à un activateur. Ce qui veut dire une puissance de collage fiable pour tous les types de restaurations – que vous travaillez avec des ciments résineux, des matériaux de reconstitution de moignons, ou que vous utilisiez des composites ou des compomères photopolymérisables, duals et autopolymérisables pour le scellement de restaurations indirectes.

iBOND Universal est compatible avec les ciments autopolymérisables et à polymérisation duale

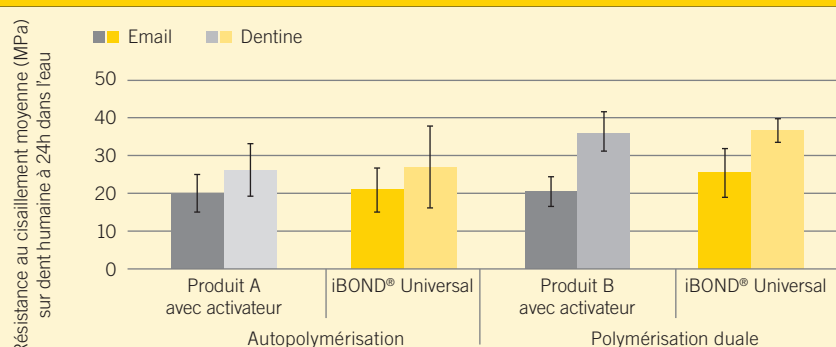

Source: R&D Kulzer, Allemagne, 2014

Toutes les indications


Quel que soit le matériau ou la situation clinique, un flacon d'adhésif vous aidera à obtenir une remarquable adhésion de vos restaurations directes et indirectes. Facilement et sûrement.

- Collage de restaurations directes de toutes les classes de cavités (selon Black) en matériaux composites/compomères à base de méthacrylate photopolymérisables, à polymérisation duale ou autopolymérisables.
- Collage de matériaux de reconstitution de moignons photopolymérisables, à polymérisation duale ou autopolymérisables.
- Scellement de zones dentaires hypersensibles.
- Etanchéification de cavités avant des reconstitutions à l'amalgame.
- Collage de matériaux de scellement de sillons (sealants).
- Etanchéification de cavités et préparations coronaires avant le scellement temporaire de restaurations indirectes (selon la technique du scellement dentaire immédiat).
- Scellement de restaurations indirectes avec des ciments résineux adhésifs photopolymérisables, polymérisation duale ou autopolymérisables.
- Réparation en bouche de restaurations en composite et compomère, de céramique cosmétique cuite sur métal, de restaurations tout céramique ou en métal.

Réparations en bouche

Réparez les fractures et les éclats au fauteuil, plutôt que d'avoir recours au remplacement des restaurations. De manière efficace, économique et en une seule séance.

- Les réparations sur zircone, sur métal précieux ou non précieux et sur composites sont réalisables facilement et rapidement avec une couche d'adhésif.
- Pour le collage sur ou la réparation de céramique siliceuse, appliquer une couche préalable d'iBOND Ceramic Primer afin d'optimiser la puissance du collage.

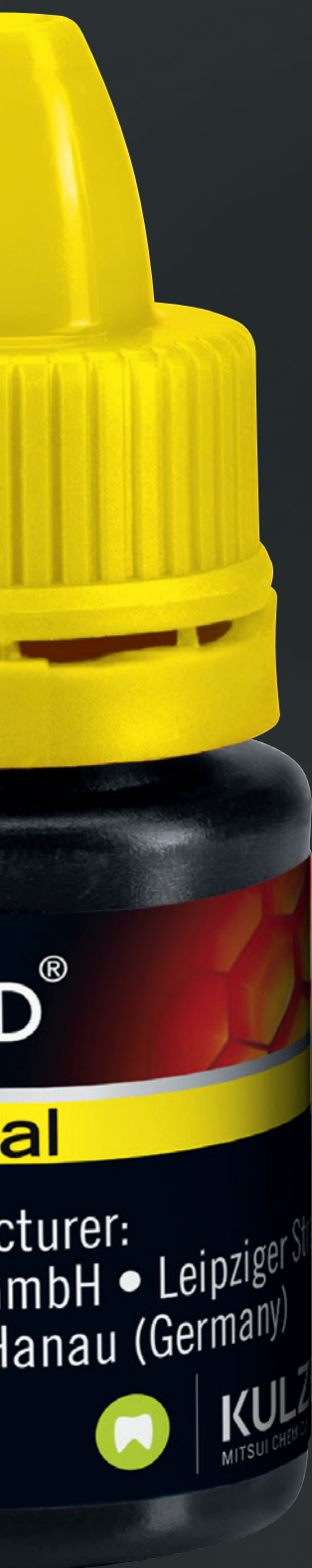

Gamme iBOND® Universal.

iBOND Universal Bottle Refill

1 flacon de 4 ml iBOND Universal
Mode d'emploi illustré
Référence : 66061411

iBOND Universal Bottle Value Pack

3 flacons de 4 ml iBOND Universal
Mode d'emploi illustré
Référence : 66061412

iBOND Universal Bottle Intro Kit

1 flacon de 4 ml iBOND Universal
1 flacon de 4 ml iBOND Ceramic Primer
1 seringue de 2,5 ml iBOND Etch 35 Gel
25 applicateurs verts (fin)
25 applicateurs rouges (standard)
10 canules
Godet de mélange
Mode d'emploi illustré
Référence : 66061413

iBOND Universal Single Dose Value Pack

100 unidoses iBOND Universal
50 applicateurs verts (fin)
50 applicateurs rouges (standard)
Mode d'emploi illustré
Référence : 66061419

iBOND Universal Single Dose Intro Kit

50 unidoses iBOND Universal
1 flacon de 4 ml iBOND Ceramic Primer
1 seringue de 2,5 ml iBOND Etch 35 Gel
25 applicateurs verts (fin)
25 applicateurs rouges (standard)
10 canules
Mode d'emploi illustré
Référence : 66061420

iBOND Ceramic Primer

1 flacon de 4 ml iBOND
Ceramic Primer
Référence : 66061416



Kulzer France
Les Conquérants - Bât. Everest
1 avenue de l'Atlantique
91976 Les Ulis
ZA Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 18 48 85
Fax. : 01 69 28 78 22
dentaire@kulzer-dental.com
www.kulzer.fr