



DÉSINFECTION, NETTOYAGE ET LUBRIFICATION AVEC OROLIN® INTRA TRAITEZ VOS INSTRUMENTS EN 5 MINUTES



① Connectez l'adaptateur OROLIN® à la bouteille OROLIN® Intra.



② Insérez complètement l'adaptateur OROLIN® au bout de connexion de votre pièce à main ou turbine.



③ Tenez la bouteille OROLIN® Intra à l'envers. Activez le pistolet jusqu'à ce que le liquide sorte de la tête de l'instrument.



④ Attendez 5 minutes pour que le désinfectant agisse.




⑤ Tenez la bouteille OROLIN® Intra à l'endroit et couvrez l'instrument d'un linge à usage unique. Activez le pistolet plusieurs fois pour évacuer la solution et faites sécher l'instrument à l'air.





⑥ Utilisez le linge à usage unique pour la désinfection extérieure de votre pièce à main ou turbine.

APPLICATION SANS AÉROSOL. COUVERTURE INTÉGRALE DES SURFACES.

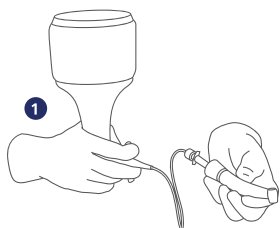

Couverture intégrale – OROLIN® Intra est le seul produit sur le marché à totalement remplir votre pièce à main, contre angle ou turbine de solution, ce qui vous assure que toutes les surfaces soient couvertes de désinfectant pendant la totalité des délais d'exposition. Il n'y aura jamais d'intervalles.

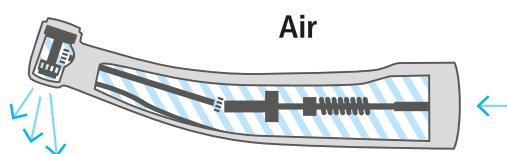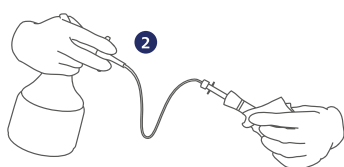

Pas d'autre traitement – vous pouvez vous servir de vos pièces à main, contre-angles ou turbines juste après le nettoyage, désinfection et lubrification avec OROLIN® Intra. Pas besoin de stériliser vos instrument pour l'usage dans des procédures non-invasives.

