

OROLIN® Multisept Plus

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Concentré puissant pour une désinfection rapide des instruments médicaux et chirurgicaux

- **Efficace contre 101 micro-organismes**
- **Covient aux appareils de nettoyage à ultrasons**
- **Intégralement virucide en 15 minutes**
- **Concentré à fort rendement**
- **Nettoyant puissant**
- **Excellente compatibilité avec les matériaux**

OROLIN® Multisept Plus est un concentré puissant pour la désinfection et le nettoyage manuels des instruments médicaux et chirurgicaux. La solution est bactéricide, tuberculocide, mycobactéricide, levuricide et virucide en 15 minutes. La formulation unique contient de puissants inhibiteurs de corrosion qui résultent en une solution beaucoup moins corrosive que l'eau sur les alliages de cuivre, le fer et l'étain. Les tests confirment la compatibilité avec l'acier inoxydable et la plupart des matériaux non métalliques, y compris le verre acrylique, le Plexiglas®, les polyamides, le polyéthylène, le PVC et le silicone. OROLIN® Multisept Plus est sans aldéhydes, phénols et chlore.

Portée d'application

- Pour la désinfection manuelle et le nettoyage d'instruments médicaux, de fraises et de tous les instruments d'endodontie notamment scalpels, stomatoscopes, forceps, cuillères, pinces, instruments à détartrer, micro-instruments, spatules, limes, curettes et sondes

Utilisation

Pour la désinfection par immersion, utiliser une solution aqueuse avec le dosage souhaité. Utiliser le couvercle comme bouchon doseur pour un dosage correct (marquage inférieur = 20 ml, marquage supérieur = 40 ml). Immerger entièrement les instruments. L'air doit être complètement évacué de toutes les cavités, des cardans doivent être ouverts. Respecter la durée d'action et rincer ensuite les instruments abondamment à l'eau. Renouveler les solutions désinfectantes deux à trois fois par semaine en fonction du degré de contamination. Un changement quotidien est recommandé. La solution peut être utilisée pendant 7 jours maximum. Non compatible avec l'aluminium, l'acier galvanisé, le polyuréthane et les fluoropolymères.

Dosage

		+		
	Concentré		Eau	Temps
2%	20 ml	+	980 ml	5 min

Composition pour 100 g : 3,6 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, 9,1 g d'alkylamine, amplificateur de nettoyage, auxiliaires



SAS Dentea
Téléphone : +33 (0)6 48 46 10 75 / +33 (0)6 73 26 33 28
Mail : contact@societe-dentea.fr
www.societe-dentea.fr

Spectre d'efficacité / délais d'exposition



Bactéricide	2% en 5 min
Bactéries résistantes aux antibiotiques	2% en 5 min
Tuberculocide	2% en 5 min
Mycobactéricide	2% en 5 min
Levuricide	2% en 5 min
Levures résistantes aux antibiotiques	2% en 5 min
Virus enveloppés	2% en 5 min
BVDV	2% en 5 min
Coronavirus	2% en 5 min
Virus de l'hépatite B	2% en 5 min
Virus de l'hépatite C	2% en 5 min
Virus de l'herpès simplex	2% en 5 min
VIH	2% en 5 min
Virus de la grippe A	2% en 1 min
Virus de la vaccine	2% en 5 min
Virus non-enveloppés	2% en 15 min
Adénovirus	2% en 5 min
Norovirus	2% en 10 min
Poliovirus	2% en 15 min

Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, directives Rkl / DVV.

Conditionnement : 2 litres / 5 litres

